

Masque UNS CAT1 de protection - réutilisable - 2 couches Référence 2CDF280 – 99127C

Domaine d'utilisation :

Ce masque est destiné au milieu professionnel ou grand public et est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes vers un tiers. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrière. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités (hôtesses de caisses, agents des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Ce masque pourra être indifféremment proposé aux professionnels ou au grand public.

Performances :

Testé par l'IFTH Type de produit : « Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1

Les essais de l'IFTH s'inspirent du protocole d'essais décrit dans le document de la DGA du 25 mars 2020.

Matériau dont les performances ont été mesurées par le laboratoire de l'IFTH, Avenue Guy de Collongue, 69134 Écully (rapport N° 2020-04-20-060-50) du 18 juin 2020 et qui supporte **50 lavages**.

Efficacité de filtration des particules de 3 µm > 90%

Perméabilité à l'air pour une dépression de 100 Pa > 96 L.m⁻².s-18.

Recommandations et limite d'utilisation :

le temps de port du masque est limité à 4 heures. Conception établie et testée sur porteur pendant 4 heures par nos soins. Il faut changer le masque quand vous souhaitez boire ou manger / quand il devient difficile de respirer / si le masque s'humidifie ou est mouillé par les intempéries / si le masque est endommagé / si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.



Recommandations de manipulation des masques :

- avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
- appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ; lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher ; ne pas déplacer le masque ;
- chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ;
- pour retirer le masque : se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou isolez-le dans un sac en plastique en attendant de le laver ; se laver les mains avec de l'eau et du savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Entretien du masque :

Avant la 1ère utilisation le masque doit être lavé. Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 50 fois.

Le cycle de lavage complet (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum avec une température de lavage de **60°C**. Vous pouvez utiliser votre lessive habituelle. Utilisez des filets de lavage (ou taie d'oreiller) afin d'éviter que les masques ne s'abiment et ne s'emmêlent entre eux. Le masque barrière doit être séché complètement au sèche linge à 60°C, puis repassé à 120°C.

Composition :

Couches 1 et 2 : double face polyester

Stockage :

Masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Contexte d'utilisation :

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID-19. Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

Avertissement :

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

Notice disponible sur le site internet : www.oxwork.com



OXWORK 81 rue de Réaumur, 75002 Paris
TVA : FR07531173615

Décompte d'utilisation des masques

Masque	Utilisation 1	Utilisation 2	Utilisation 3	Utilisation 4	Utilisation 5	Utilisation 6	Utilisation 7	Utilisation 8	Utilisation 9	Utilisation 10	Utilisation 11	Utilisation 12	Utilisation 13	Utilisation 14	Utilisation 15	Utilisation 16	Utilisation 17	Utilisation 18	Utilisation 19	Utilisation 20	Utilisation 21	Utilisation 22	Utilisation 23	Utilisation 24	Utilisation 25	Utilisation 26	Utilisation 27	Utilisation 28	Utilisation 29	Utilisation 30	Utilisation 31	Utilisation 32	Utilisation 33	Utilisation 34	Utilisation 35	Utilisation 36	Utilisation 37	Utilisation 38	Utilisation 39	Utilisation 40	Utilisation 41	Utilisation 42	Utilisation 43	Utilisation 44	Utilisation 45	Utilisation 46	Utilisation 47	Utilisation 48	Utilisation 49	Utilisation 50
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------